

 **DENTECH**

MADE IN JAPAN | SINCE 1907



TOP GLOVE

TOP QUALITY, TOP EFFICIENCY



СИСТЕМА РАББЕРДАМ

КЛАМПЫ

ИНСТРУМЕНТЫ

ЛАТЕКСНЫЕ ЛИСТЫ



О КОМПАНИИ

- 1907 Кейджири Кимура основал в Токио первую в Японии компанию по производству стоматологических боров и назвал её своим именем KousakuSho Kimura (фабрика Кимуры).
- 1940 Начало серийного производства инструментов для системы раббердам.
- 1944 Во время Второй Мировой войны, фабрика была практически уничтожена.
- 1947 Производство переносится в другой район Токио, Итабаши.
- 1954 Мощнейший тайфун полностью разрушил фабрику.
- 1955 Строительство новых производственных корпусов и возобновление выпуска продукции.



После Второй Мировой войны большое количество стоматологов прибыло в Японию, сопровождая американскую армию. Тесное сотрудничество с ними, позволило компании усовершенствовать выпускаемые инструменты KSK (KousakuSho Kimura) и выйти на более высокий технологический уровень производства.

- 1971 Начало экспорта инструментов KSK в США.
- 1973 Первые поставки в Германию и другие страны Европы.
- 1974 Переименование в **Dentech Corporation**.
- 1976 Компания становится пионером в области изготовления свёрел для имплантологии в Японии. На сегодняшний день большинство японских производителей применяют данную продукцию в своих системах.



- 2007 100-летний юбилей со дня основания компании **Dentech Corporation**.
- 2008 Начало поставок инструментов для системы раббердам в Россию.

Dentech Corporation сегодня – это высокотехнологичная компания, обладающая передовой системой проверки качества в сочетании с современным оборудованием для разработки и производства инструментов высочайшего уровня.



Продукция компании экспортируется на 5 континентов и применяется стоматологами более чем в 40 странах мира. Сотрудничество с национальными и международными университетами, клиниками и образовательными центрами позволяют компании постоянно совершенствовать свою продукцию.

Инструменты KSK – удовлетворяют требованиям:

- ISO 13485 – 2003 (международный стандарт безопасности в области производства и применения изделий медицинского назначения).
- CE – соответствие продукции европейским стандартам безопасности для человека, имущества и окружающей среды.
- ГОСТ Р – соответствие национальным стандартам принятым в РФ. Продукция разрешена к импорту, продаже и применению на территории Российской Федерации. (Регистрационное удостоверение РосЗдравНадзора РФ № ФС32008/02073 от 07.06.2008г., срок действия не ограничен)



СОДЕРЖАНИЕ

ЛАТЕКСНЫЕ ЛИСТЫ ДЛЯ РАББЕРДАМА DURADAM™	2
КЛАМПЫ ДЛЯ ПРЕМОЛЯРОВ	3
КЛАМПЫ ДЛЯ МОЛЯРОВ	9
КЛАМПЫ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНОЙ ГРУППЫ ЗУБОВ	21
КЛАМПЫ БРИНКЕРА	25
КЛАМПЫ ДЛЯ МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ И ПЕРВЫХ ДЕТСКИХ МОЛЯРОВ	29
КЛАМПЫ ТИГРОВЫЕ (С РЕТЕНЦИОННЫМИ ЗУБЦАМИ)	33
КЛАМПЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ	37
НАБОРЫ, ПОДСТАВКИ И ОТДЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	41

ИСПОЛНЕНИЕ



БЕЗ ПОКРЫТИЯ,
ГЛЯНЦЕВЫЕ



С ЧЕРНЫМ
ПОКРЫТИЕМ
(BLACK)



С МАТОВЫМ
ПОКРЫТИЕМ
(MATT)

ФОРМА



КЛАМПЫ С КРЫЛЬЯМИ



КЛАМПЫ БЕЗ КРЫЛЬЕВ

Преимущества клампов с черным покрытием (BLACK): уменьшается отражение (отблеск) от яркого операционного света; увеличивается контрастность при работе с микроскопом и биноклями; запатентованный оксидный слой, который наносится на поверхность клампов, дополнительно защищает металл от коррозии.

Клампы KSK изготавливаются из специальной закаленной нержавеющей стали, что придает им превосходный пружинящий эффект и максимальную устойчивость к коррозии. Для лучшей фиксации на зубе щечки клампов затачиваются на специальном оборудовании. Чтобы гарантировать высокую упругость и долгий срок службы клампов, каждая партия продукции проходит проверку на прочность.

ВАЖНО!

Не рекомендуется растягивать клампы более чем на 1,5мм относительно ширины зуба. Приложение чрезмерного усилия при растяжении клампа может привести к его поломке. После 4'000 применений возможна поломка клампа вследствие усталости металла. Клампы, подставки для них и инструменты Dentech рекомендуется автоклавируют при температуре не более

132°C
SSS

ЛАТЕКСНЫЕ ЛИСТЫ ДЛЯ РАББЕРДАМА DURADAM™



Размеры:

Средний – medium, толщина 0,18мм., 152x152мм.

Плотный – heavy, толщина 0,22мм., 152x152мм.

Цвета: зеленый, голубой, черный

Аромат: нейтральный

Кол-во в упаковке – 36шт.

Транспортная коробка – 40уп.

Производитель: DuraMedical SDN BHD, Малайзия

Номера для заказа:

Арт. DDGR6M — зеленые, средние, 0.18 мм.

Арт. DDGR6H — зеленые, плотные, 0.22 мм.

Арт. DDLB6M — голубые, средние, 0.18 мм.

Арт. DDLB6H — голубые, плотные, 0.22 мм.

Арт. DDBK6M — черные, средние, 0.18 мм.

Арт. DDBK6H — черные, плотные, 0.22 мм.

Одним из важнейших изобретений для стоматологии является раббердам, который также называют коффердам. Он представляет собой особый латексный лист, который накладывается для изоляции рабочего поля при обработке зубов, установке пломб и других врачебных манипуляциях в полости рта. В современной стоматологии под раббердамом понимают целую систему инструментов и дополнительных материалов, которые позволяют изолировать одну или несколько зон вмешательства в ротовой полости.

Создателем подобной техники принято считать французского доктора Ла-Роше, который в 1883 году объявил о том, что применял в своей практике раббердам в течение 26 лет, то есть с 1857 года. Однако официально первым научной общественности презентовал систему дантист из Нью Йорка Сэнфорд Кристи Барнум. Это произошло на заседании стоматологического общества в начале лета 1864 года. Опубликованная информация о новой технологии появилась уже в августе того же года, а, начиная с 1867 года, листы из латекса начали применять повсеместно.

Латексные листы изготавливаются с использованием сока гевеи бразильской, размеры их, как правило, стандартные (152 x 152мм.), однако толщина и расцветка могут варьироваться. Большинство стоматологов используют в своей практике листы зеленого и синего цвета, толщиной 0,18мм.(Medium-средний) и 0,22мм. (Heavy-плотный).

В данном каталоге мы предлагаем Вашему вниманию латексные листы производства известной малазийской компании DuraMedical SDN BHD, торговая марка **DuraDam™**.

Название выбрано производителем не случайно:

DuraDam™ – это следствие сокращения двух слов: Durable (англ. «прочный, надежный, крепкий») и Dam (медицинский англ. «тонкая резиновая защитная прокладка»). Латексные завесы **DuraDam™** обладают непревзойденной эластичностью и прочностью на разрыв. Листы имеют разные поверхности. Гладкая всегда обращена к пациенту и обеспечивает скольжение по поверхности изолируемых зубов. Матовая сторона обращена непосредственно к врачу, она не отвечает от стоматологического бестеневого светильника. Для ежедневного использования рекомендуются латексные листы средней толщины Medium, т.к. они подходят для любой техники установки системы раббердам. При проведении препарирования твердых тканей под несъемные ортопедические конструкции рекомендуется применять плотные латексные листы Heavy. Зеленый или голубой цвет обеспечивает отличный контраст контуров. Латексные платки **DuraDam™** изготовлены в соответствии с самыми строгими международными стандартами качества, что подтверждено сертификатами: ISO 9001, ISO 13485, FDA Approval, CE и Регистрационным удостоверением РосЗдравНадзора РФ.



КЛАМПЫ ДЛЯ
ПРЕМОЛЯРОВ

 **DENTECH**



КЛАМПЫ ДЛЯ ПРЕМОЛЯРОВ



№0

Арт. 01012701

№0-Black

Арт. 01019701

Клампы для премоляров верхней и нижней челюсти, резцов верхней челюсти. Щечки клампы имеют небольшой размер, что позволяет использовать его при дистопии и скученности зубов во фронтальном отделе, а также в области первого премоляра и клыка, где происходит изгиб зубного ряда и клампы №1 или №2 не помещаются с лингвальной стороны. Клампы имеют выраженные латеральные крылья для удобной фиксации края перфорации латексного платка.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ:

13-12-11-21-22-23-33-32-31-41-42-43



№00

Арт. 01012702

№00-Black

Арт. 01019702

Клампы для премоляров нижней и верхней челюсти, резцов нижней челюсти. Щечки клампы меньше, чем у клампы №0. Он также используется при дистопии и скученности зубов во фронтальном отделе и в области первого премоляра и клыка, где происходит изгиб зубного ряда и клампы №1 или №2 не помещаются с лингвальной стороны. Клампы имеют выраженные латеральные крылья для удобной фиксации края перфорации латексного платка.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ:

13-12-11-21-22-23-33-32-31-41-42-43



№1

Арт. 01012001


№1-Black

Арт. 01019001

Клампы для клыков и премоляров верхней и нижней челюсти, для зубов с сильно разрушенной или отсутствующей коронковой частью (если оставшаяся часть корня при незначительной ретракции десны позволяет получить четырехточечную фиксацию клампы углами). Латеральные крылья небольшого размера. Щечки имеют воронкообразный изгиб в апикальном направлении. Рекомендуется при создании протяженных двусторонних участков изоляции зубных рядов, при лечении множественного кариеса, возможно в сочетании с эндодонтией нескольких зубов, фиксации ортодонтических ретейнеров.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ:

15-14-13-23-24-25-35-34-33-43-44-45

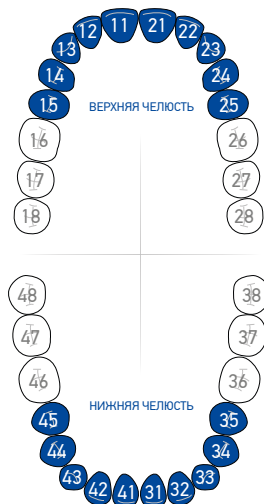

КЛАМПЫ ДЛЯ ПРЕМОЛЯРОВ



№1A

Арт. 01012901

Клампы для клыков и премоляров верхней и нижней челюсти, для зубов с сильно разрушенной или отсутствующей коронковой частью (если фиксация клампа №1 невозможна). Кламп имеет выраженные углы, выступающие значительно ниже плоскости щечек. Щечки имеют воронкообразный изгиб в апикальном направлении.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ:

15-14-13-23-24-25-35-34-33-43-44-45

№1A-Black

Арт. 01019901



№2

Арт. 01012002

Клампы для клыков и премоляров верхней и нижней челюсти, для зубов с незначительными разрушениями коронковой части, сохраненной ферулой и выраженным экватором. Латеральные крылья небольшого размера. Щечки плоские, малого радиуса. Рекомендуется при создании протяженных двусторонних участков изоляции зубных рядов, при лечении множественного кариеса, возможно в сочетании с эндодонтией нескольких зубов, фиксации ортодонтических ретейнеров.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ:

15-14-13-23-24-25-35-34-33-43-44-45

№2-Black

Арт. 01019002



№2A

Арт. 01012902


Клампы для клыков и премоляров верхней и нижней челюсти, для зубов с незначительными разрушениями коронковой части, сохраненной ферулой и выраженным экватором. Латеральные крылья небольшого размера. Щечки плоские, среднего радиуса.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ:

15-14-13-23-24-25-35-34-33-43-44-45

№2A-Black

Арт. 01019902

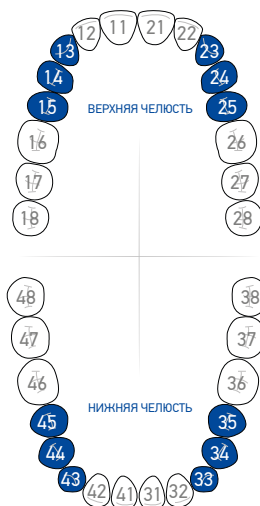

I КЛАМПЫ ДЛЯ ПРЕМОЛЯРОВ



№W2A

Арт. 01012992

Клампы для клыков и премоляров верхней и нижней челюсти, для зубов с незначительными разрушениями коронковой части, сохраненной ферулой и выраженным экватором. Латеральные крылья отсутствуют. Щечки плоские, среднего радиуса. Рекомендуется при протяженных двусторонних изоляциях фронтальных участков верхней и нижней челюсти, при препарировании под несъемные ортопедические конструкции и их адгезивной фиксации, при лечении множественного кариеса в сочетании с эндодонтией нескольких зубов, фиксации ортодонтических ретейнеров.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ:

15-14-13-23-24-25-35-34-33-43-44-45

№W2A-Black

Арт. 01019992



№22

Арт. 01012022

Клампы для клыков и премоляров верхней и нижней челюсти, для зубов с незначительными разрушениями коронковой части, сохраненной ферулой и выраженным экватором. Латеральные крылья отсутствуют. Он удобен при одевании перфорации латексного платка через клампы. Рекомендуется при протяженных двусторонних изоляциях фронтальных участков верхней и нижней челюсти, препарировании под несъемные ортопедические конструкции и их адгезивной фиксации, лечении множественного кариеса, фиксации ортодонтических ретейнеров, изоляции одиночных зубов для эндодонтического лечения.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ:

15-14-13-23-24-25-35-34-33-43-44-45

№22-Black

Арт. 01019022



№27

Арт. 01012027


Клампы для клыков и премоляров верхней и нижней челюсти, для зубов с сильно разрушенной или отсутствующей коронковой частью. Латеральные крылья отсутствуют. Вместо медиальных крыльев - небольшие углы, служащие для отодвигания платка и его защиты от ротационного инструмента. Щечки имеют воронкообразный изгиб в апикальном направлении. Клампы также можно использовать как якорный, при протяженных двусторонних изоляциях фронтальных участков верхней и нижней челюсти.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ:

15-14-13-23-24-25-35-34-33-43-44-45

№27-Black

Арт. 01019027

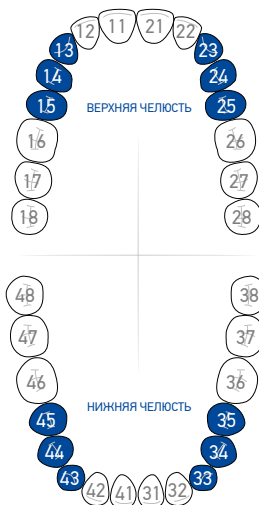

КЛАМПЫ ДЛЯ ПРЕМОЛЯРОВ



№29

Арт. 01012029

№29-Black

Арт. 01019029

Клампы для клыков и премоляров верхней и нижней челюсти, для зубов с сильно разрушенной или отсутствующей коронковой частью. Латеральные крылья отсутствуют. Вместо медиальных крыльев - небольшие углы, служащие для отодвигания платка и его защиты от ротационного инструмента. В отличие от клампа №27, имеет более широкие щеки и меньший радиус дуги, что обеспечивает более надёжную фиксацию клампа на опорном зубе. Кламп также можно использовать как якорный, при протяженных двусторонних изоляциях фронтальных участков верхней и нижней челюсти.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ:

15-14-13-23-24-25-35-34-33-43-44-45



№206

Арт. 01012206

№206-Black

Арт. 01019206

Клампы для клыков и премоляров верхней и нижней челюсти, для зубов с сильно разрушенной или отсутствующей коронковой частью (если оставшаяся часть корня при незначительной ретракции десны позволяет получить четырехточечную фиксацию клампа углами). Латеральные крылья большого размера. Щеки клампа имеют воронкообразный изгиб в апикальном направлении. В отличие от клампа №1, щеки шире, а медиальные крылья имеют небольшой изгиб для более легкого взаиморасположения клампа с соседними зубами. Рекомендуется при лечении кариеса в сочетании с эндодонтией или выполнения черного препарирования коронковой части зуба под ортопедическую конструкцию.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ:

15-14-13-23-24-25-35-34-33-43-44-45



№207

Арт. 01012207


№207-Black

Арт. 01019207

Клампы для клыков и премоляров верхней и нижней челюсти, для зубов с незначительными разрушениями коронковой части, сохраненной ферулой и выраженным экватором. Латеральные крылья большого размера. Щеки клампа плоские. В отличие от клампа №2, щеки клампа шире, среднего радиуса, а медиальные крылья имеют небольшой изгиб для более легкого взаиморасположения клампа с соседними зубами. Рекомендуется при лечении кариеса в сочетании с эндодонтией или для выполнения черного препарирования коронковой части зуба под ортопедическую конструкцию.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ:

15-14-13-23-24-25-35-34-33-43-44-45

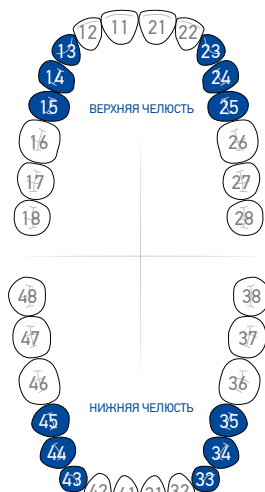

I КЛАМПЫ ДЛЯ ПРЕМОЛЯРОВ



№208

Арт. 01012208


№208-Black

Арт. 01019208

Клампы для клыков и премоляров верхней и нижней челюсти, для зубов с незначительными разрушениями коронковой части, сохраненной ферулой и выраженным экватором. Латеральные крылья большого размера. Щечки клампа плоские. В отличие от клампа №2, щечки клампа шире, большого радиуса (для премоляров крупного размера), медиальные крылья имеют небольшой изгиб для более легкого взаиморасположения клампа с соседними зубами. Рекомендуется при лечении кариеса в сочетании с эндодонтией или для выполнения чернового препарирования коронковой части зуба под ортопедическую конструкцию.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ:

15-14-13-23-24-25-35-34-33-43-44-45

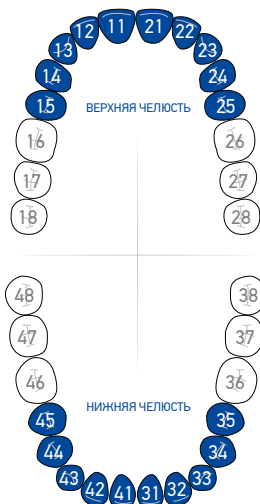

№209

Арт. 01012209

№209-Black

Арт. 01019209

Клампы для клыков и премоляров верхней и нижней челюсти, для зубов с незначительными разрушениями коронковой части, сохраненной ферулой и выраженным экватором. Латеральные крылья большого размера. Щечки клампа плоские, среднего радиуса. В отличие от клампа №2, латеральные крылья больше и надежнее удерживают его в перфорации латексного платка при установке на опорные зубы. Рекомендуется при лечении кариеса в сочетании с эндодонтией или для выполнения чернового препарирования коронковой части зуба под ортопедическую конструкцию.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ:

15-14-13-23-24-25-35-34-33-43-44-45



№Y10-Matt

Арт. 01014999

«Бескрылый» аналог клампа №1. Клампы для клыков и премоляров верхней и нижней челюсти, для зубов с сильно разрушенной или отсутствующей коронковой частью. Щечки имеют воронкообразный изгиб в апикальном направлении. Рекомендуется при создании протяженных двусторонних участков изоляции зубных рядов, при лечении множественного кариеса, возможно в сочетании с эндодонтией нескольких зубов, фиксации ортодонтических ретейнеров. Матовое покрытие клампа помогает избежать усталости глаз из-за отражения операционного света.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ:

15-14-13-23-24-25-35-34-33-43-44-45

КЛАМПЫ ДЛЯ
МОЛЯРОВ

 **DENTECH**



I КЛАМПЫ ДЛЯ МОЛЯРОВ



№DC1

Арт. 50030000

Дистальный кламп. Клампы для моляров верхней и нижней челюсти. Выгнутая назад дуга обеспечивает легкий доступ к дистальной части моляра. Один из универсальных клампов для всех видов терапевтических работ. Имеет крылья и симметричные щечки среднего радиуса несильно изогнутые по плоскости. Матовое покрытие клампа помогает избежать усталости глаз из-за отражения операционного света.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 17-16-26-27-37-36-46-47



№3

Арт. 01012003

№3-Black

Арт. 01019003

Клампы для моляров верхней и нижней челюсти, с невыраженным экватором и/или со значительно разрушенной медиальной поверхностью зуба. Благодаря небольшому размеру щечек клампа, его углы не будут проваливаться в межзубный промежуток.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 17-16-26-27-37-36-46-47



№W3

Арт. 01012903


№W3-Black

Арт. 01019903

Клампы для моляров небольшого размера, дистопированных из зубного ряда; для моляров верхней челюсти, иногда имеющих ромбовидную форму; для фиксации на восьмые зубы (зубы мудрости) при значительном дефиците пространства в латеральную сторону. Благодаря отсутствию крыльев он может быть предпочтительнее № 12А и № 13А.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ:

18-17-16-26-27-28-38-37-36-46-47-48

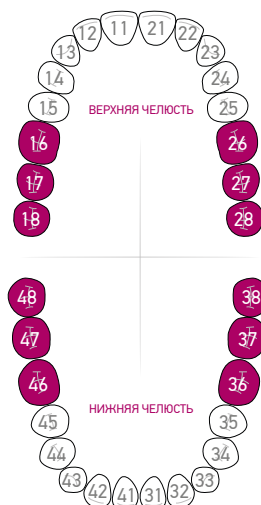

КЛАМПЫ ДЛЯ МОЛЯРОВ



№4


Арт. 01012004

Аналог клампа №3 - для моляров верхней и нижней челюсти с небольшой или разрушенной коронковой частью. Особенность клампа - изогнутые боковые щёчки для надежной фиксации в области шейки зуба. Во избежание травмы десны при установке этого клампа требуется дополнительная осторожность.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 17-16-26-27-37-36-46-47

№4-Black

Арт. 01019004

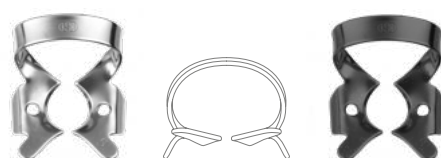

№5

Арт. 01012005

Клампа для моляров верхней и нижней челюсти. Имеет средний диаметр и размер щечек. Благодаря небольшому изгибу щечек и горизонтально расположенным крыльям, удобен при создании реставраций II-класса по Блеку.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 17-16-26-27-37-36-46-47

№5-Black

Арт. 01019005



№7


Арт. 01012007

Клампа для моляров верхней и нижней челюсти. Особенность клампа - плоские боковые щечки. Его надежная фиксация возможна при наличии выраженного экватора коронковой части зуба. На боковых крыльях имеются дополнительные овальные отверстия, облегчающие снятие края перфорации латексного платка при установке. Один из наименее агрессивных клампов, может применяться при реставрации I-класса по Блеку, если она проводится на фиссурном кариезе.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 17-16-26-27-37-36-46-47

№7-Black

Арт. 01019007

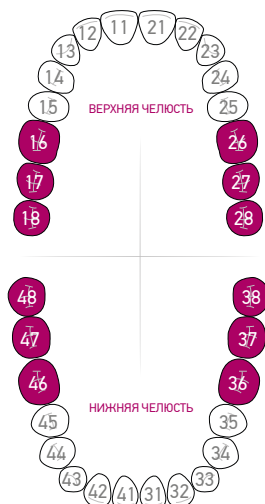

I КЛАМПЫ ДЛЯ МОЛЯРОВ



№7A


Арт. 01012907

Клампы для очень больших моляров верхней и нижней челюсти. По сравнению с клампом №7, обладает большей дугой и радиусом щечек. При аккуратной установке, давление клампа на мягкие ткани и, соответственно, дискомфорт пациента минимален.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 17-16-26-27-37-36-46-47

№7A-Black

Арт. 01019907

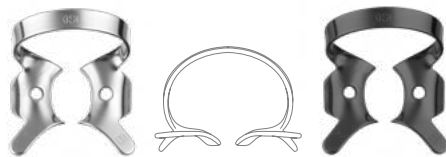

№8

Арт. 01012008

Клампы для моляров верхней и нижней челюсти с выраженным воронкообразным изгибом щечек. Применяется при сильном разрушении коронковой части и препарировании тканей зуба в пришеечной области.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 17-16-26-27-37-36-46-47

№8-Black

Арт. 01019008



№8A


Арт. 01012908

Клампы для моляров верхней и нижней челюсти с очень разрушенной, практически отсутствующей, коронковой частью. Удлиненные боковые щечки и выступающие углы позволяют надежно фиксировать его на корне моляра на уровне десневой борозды и ниже.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 17-16-26-27-37-36-46-47

№8A-Black

Арт. 01019908

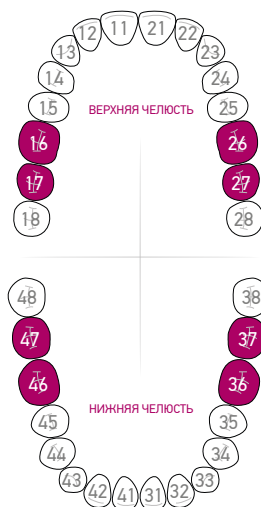

КЛАМПЫ ДЛЯ МОЛЯРОВ

аналог клампа Бринкер В1



№W8A


Арт. 01012998

Клампы для моляров верхней и нижней челюсти с очень разрушенной, практически отсутствующей, коронковой частью. Удлиненные боковые щечки и выступающие углы позволяют надежно фиксировать его на корне моляра на уровне десневой борозды и ниже. Отсутствие крыльев позволяет использовать клампы в дистальных участках зубного ряда у пациентов с небольшими размерами челюстей или очень выраженной носой линией нижней челюсти.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 17-16-26-27-37-36-46-47

№W8A-Black

Арт. 01019998

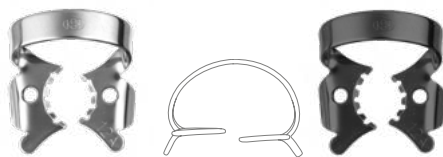

№12A

Арт. 01012912

Клампы с дополнительными ретенционными пунктами на щечках (тигровый кламп). Он разработан для установки на третьи моляры верхней челюсти слева и третьи моляры нижней челюсти справа. Может использоваться для установки на сильно разрушенные зубы, на несъемные ортопедические конструкции, при отсутствии экватора зуба (покатые боковые поверхности коронки зуба). Имеет дугу небольшого радиуса и асимметричные щечки, расположенные на разных уровнях, что очень удобно при не сильно выраженном наклоне изолируемого зуба.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 28-48

№12A-Black

Арт. 01019912



№13A


Арт. 01012913

Клампы с дополнительными ретенционными пунктами на щечках (тигровый кламп). Он разработан для установки на третьи моляры верхней челюсти справа и третьи моляры нижней челюсти слева. Может использоваться для установки на сильно разрушенные зубы, на несъемные ортопедические конструкции, при отсутствии экватора зуба (покатые боковые поверхности коронки зуба). Имеет дугу небольшого радиуса и асимметричные щечки, расположенные на разных уровнях, что очень удобно при не сильно выраженном наклоне изолируемого зуба.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 18-38

№13A-Black

Арт. 01019913

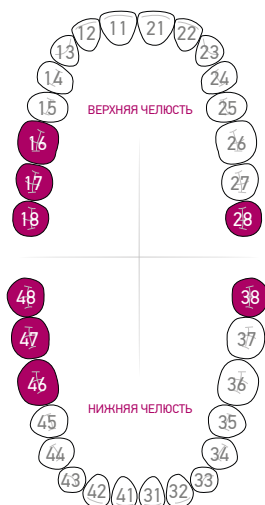

I КЛАМПЫ ДЛЯ МОЛЯРОВ



№14

Арт. 01012014

Клампы для частично прорезавшихся моляров верхней и нижней челюсти, а также зубов, имеющих значительное разрушение коронковой части или полностью разрушенную мезиальную стенку. Как и кламп №3, имеет щечки небольшого размера, но они изогнуты по плоскости в виде воронки. Часто применяется для работы с кариозными поражениями твердых тканей зуба любой локализации и на коронках зубов с невыраженным экватором.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 17-16-26-27-37-36-46-47

№14-Black

Арт. 01019014

№14A


Арт. 01012914

Клампы для частично прорезавшихся моляров верхней и нижней челюсти, а также для зубов, имеющих значительное разрушение коронковой части или полностью разрушенную мезиальную стенку. В отличие от клампа №14 имеет широкие щечки. Часто применяется для работы с кариозными поражениями твердых тканей зуба любой локализации и на зубах с коронковой частью большого размера.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 17-16-26-27-37-36-46-47

№14A-Black

Арт. 01019914

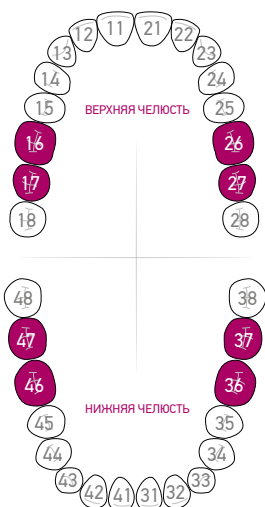

№15

Арт. 01012015

Клампы для моляров верхней и нижней челюсти с более широкой дугой, обеспечивающей хорошее прижатие щечек к шейке зуба и ретенцию клампа. Щечки клампа имеют большой радиус и эллиптическую форму. Кламп предназначен для зубов с коронковой частью большого размера. В отличие от клампов №7А и №14А, не имеет крыльев. В большинстве случаев его удобно использовать как якорный кламп при изоляции протяженных участков зубного ряда до контралатерального клыка.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 17-16-26-27-37-36-46-47

№15-Black

Арт. 01019015

КЛАМПЫ ДЛЯ МОЛЯРОВ



№18

Арт. 01012018

№18-Black

Арт. 01019018

Клампы для моляров верхней и нижней челюсти. Без крыльев. Наружные края щечек закруглены для большей компактности. Типичная область применения – как якорный кламп при протяженных участках изоляции. Также используется для адгезивной фиксации ортопедической конструкции, при эндодонтическом лечении, при дистопии зубов, небольших размерах коронковой части и средней выраженности экватора зуба.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 17-16-26-27-37-36-46-47



№24

Арт. 01012024

№24-Black

Арт. 01019024

Клампы для моляров верхней и нижней челюсти. Крылья отсутствуют, щечки асимметричные. Рекомендуется при изоляции протяженных участков как якорный кламп. Он удобен при фиксации на коронки первых и вторых моляров верхней челюсти, имеющих ромбовидную форму, при небольшой дистопии зубов, соседних с изолируемым. Асимметрия щечек клампа предполагает его использование с левой стороны, но в зависимости от клинической ситуации, может быть также использован справа.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 17-16-26-27-37-36-46-47



№25


Арт. 01012025

№25-Black

Арт. 01019025

Клампы для моляров верхней и нижней челюсти. Крылья отсутствуют, щечки асимметричные. Рекомендуется при изоляции протяженных участков как якорный кламп. Он удобен при фиксации на коронки первых и вторых моляров верхней челюсти, имеющих ромбовидную форму, при небольшой дистопии зубов, соседних с изолируемым. Асимметрия щечек клампа предполагает его использование с правой стороны, но в зависимости от клинической ситуации, может быть также использован слева.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 17-16-26-27-37-36-46-47

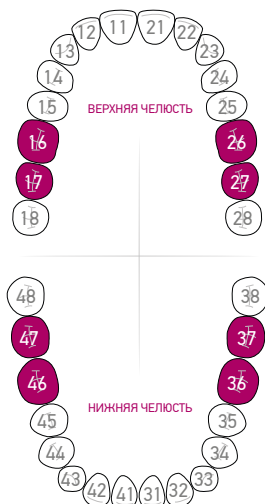

I КЛАМПЫ ДЛЯ МОЛЯРОВ



№26


Арт. 01012026

Клампы для моляров верхней и нижней челюсти. Крылья отсутствуют, среднего размера щеки вогнуты в апикальном направлении. Идеальны как якорный кламп на зубы с коронковыми частями среднего размера. Возможна надежная фиксация на сильно разрушенные зубы с небольшой ретракцией краевой десны и десневых сосочков. Широкие щеки обеспечивают хороший обзор со всех сторон и не дают платку, при натяжении, приближаться к коронковой части зуба в момент ее препарирования ротационными инструментами.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 17-16-26-27-37-36-46-47

№26-Black

Арт. 01019026

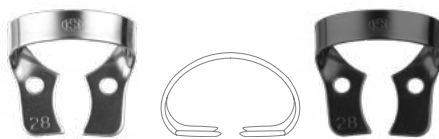

№28

Арт. 01012028

Клампы для моляров верхней и нижней челюсти. Крылья отсутствуют, увеличенные щеки вогнуты в апикальном направлении. Идеальны как якорный кламп на зубы с большой коронковой частью. Возможна надежная фиксация на сильно разрушенные зубы с небольшой ретракцией краевой десны и десневых сосочков. Широкие щеки обеспечивают хороший обзор со всех сторон и не дают платку, при натяжении, приближаться к коронковой части зуба в момент ее препарирования ротационными инструментами.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 17-16-26-27-37-36-46-47

№28-Black

Арт. 01019028



№30


Арт. 01012030

Клампы для моляров верхней челюсти справа. Щеки асимметричные, крылья отсутствуют. На одной из щечек есть шип, смещенный к медиальному, вестибулярному углу клампа. Он обеспечивает возможность дополнительной ретенции в области рецессии краевой десны в проекции фуркации корней моляров верхней челюсти с вестибулярной стороны (дефекты I-II класса по Гликману).

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 16-17

№30-Black

Арт. 01019030

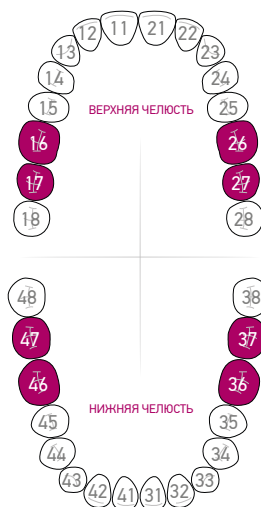

КЛАМПЫ ДЛЯ МОЛЯРОВ



№31

Арт. 01012031

Клампы для моляров верхней челюсти слева. Щечки асимметричные, крылья отсутствуют. На одной из щечек есть шип, смещенный к медиальному, вестибулярному углу клампа. Он обеспечивает возможность дополнительной ретенции в области рецессии краевой десны в проекции фуркации корней моляров верхней челюсти с вестибулярной стороны (дефекты I-II класса по Гликману).

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 26-27

№31-Black

Арт. 01019031



№51

Арт. 01012051

Клампы для моляров нижней челюсти. Крылья отсутствуют. В отличие от клампов №30 и №31, имеет симметричные щечки. В середине каждой из щечек имеется шип, он обеспечивает возможность дополнительной ретенции в области рецессии краевой десны в проекции фуркации корней моляров нижней челюсти с вестибулярной и лингвальной стороны (дефекты I-II класса по Гликману). Клампы хорошо фиксируются благодаря более широкой дуге и усилию, которое она развивает.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 37-36-46-47

№51-Black

Арт. 01019051



№56


Арт. 01012056

Клампы для моляров верхней и нижней челюсти - один из наиболее востребованных универсальных клампов для всех видов терапевтических работ. Имеет крылья и симметричные, среднего радиуса, щечки несильно изогнутые по плоскости.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 17-16-26-27-37-36-46-47

№56-Black

Арт. 01019056

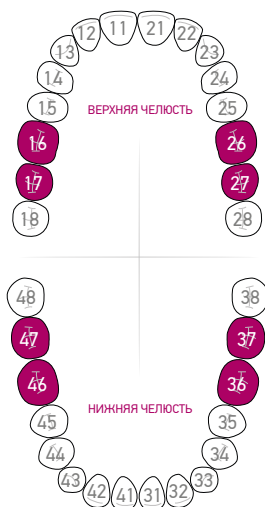

КЛАМПЫ ДЛЯ МОЛЯРОВ



№56A

Арт. 01012956

Клампы для моляров верхней и нижней челюсти. Имеет симметричные щечки большого радиуса для зубов с крупной коронковой частью. На боковых крыльях имеются дополнительные овальные отверстия, облегчающие снятие края перфорации латексного платна при установке.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 17-16-26-27-37-36-46-47

№56A-Black

Арт. 01019956



№138

Арт. 01012138

Клампы для третьих моляров, левый. Крылья отсутствуют, асимметричные щечки расположены на разных уровнях. Он идеален для использования в качестве якорного клампа при протяженных участках изоляции зубного ряда, при дефиците пространства с вестибулярной стороны опорного зуба, вызванного анатомическими пропорциями челюстных костей пациента.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 28-38

№138-Black

Арт. 01019138



№139


Арт. 01012139

Клампы для третьих моляров, правый. Крылья отсутствуют, асимметричные щечки расположены на разных уровнях. Он идеален для использования в качестве якорного клампа при протяженных участках изоляции зубного ряда, при дефиците пространства с вестибулярной стороны опорного зуба, вызванного анатомическими пропорциями челюстных костей пациента.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 18-48

№139-Black

Арт. 01019139

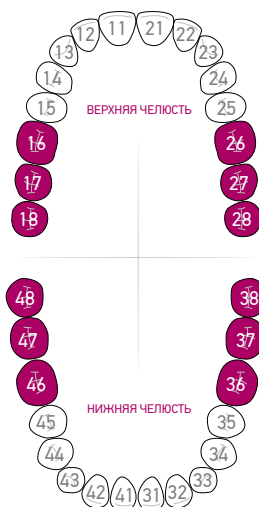

КЛАМПЫ ДЛЯ МОЛЯРОВ



№U67

Арт. 01012067

Компактный кламп для моляров верхней и нижней челюсти. Имеет скошенные внутрь изогнутые щечки среднего размера. Удобен при работе с дистопированными зубами. На боковых крыльях имеются дополнительные овальные отверстия, облегчающие снятие края перфорации латексного платка при установке.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 17-16-26-27-37-36-46-47

№U67-Black

Арт. 01019067



№201


Арт. 01012201

Клампы для моляров верхней и нижней челюсти. Щечки симметричные. Отличается от клампа №200 наличием воронкообразных щечек, изогнутых в апикальном направлении для лучшей фиксации. Широкие щечки обеспечивают хороший обзор со всех сторон и не дают платку, при натяжении, приближаться к коронковой части зуба в момент ее препарирования ротационными инструментами. На боковых крыльях имеются дополнительные овальные отверстия, облегчающие снятие края перфорации латексного платка при установке.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 17-16-26-27-37-36-46-47

№201-Black

Арт. 01019201

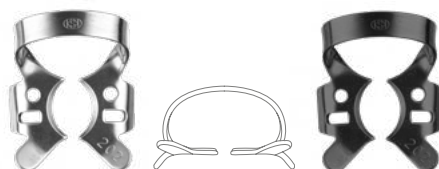

№202


Арт. 01012202

Клампы для моляров верхней и нижней челюсти. Для зубов с крупной коронковой частью. Наряду с клампом №200, является одним из наименее агрессивных клампов, может применяться при реставрации I-класса по Блэку, если она проводится на фиссурном кариесе. Медиальные крылышки клампа имеют изгиб в сторону окклюзионной плоскости, что может быть удобно при использовании различных аксессуаров, при создании реставрации II-класса по Блэку. Симметричные широкие щечки большого радиуса обеспечивают хороший обзор со всех сторон. Они не дают платку при натяжении приближаться к коронковой части зуба в момент ее препарирования ротационными инструментами. На боковых крыльях имеются дополнительные овальные отверстия, облегчающие снятие края перфорации латексного платка при установке.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 17-16-26-27-37-36-46-47

№202-Black

Арт. 01019202

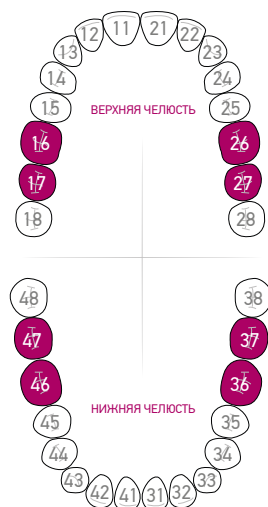

I КЛАМПЫ ДЛЯ МОЛЯРОВ



№203

Арт. 01012203

Клампы для моляров верхней и нижней челюсти, справа. Подходит для установки на зубы с невыраженным экватором, возможно со значительно разрушенной медиальной коронковой поверхностью. Благодаря небольшому размеру щечек клампа, его углы не будут проваливаться в межзубный промежуток. Кламп имеет асимметричные щечки и дугу небольшого радиуса, которая несильно выступает над окклюзионной плоскостью зуба и не ограничивает движения головки турбинного наконечника.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 16-17-47-46

№203-Black

Арт. 01019203



№204

Арт. 01012204

Клампы для моляров верхней и нижней челюсти, слева. Подходит для установки на зубы с невыраженным экватором, возможно со значительно разрушенной медиальной коронковой поверхностью. Благодаря небольшому размеру щечек клампа, его углы не будут проваливаться в межзубный промежуток. Кламп имеет асимметричные щечки и дугу небольшого радиуса, которая не сильно выступает над окклюзионной плоскостью зуба и не ограничивает движения головки турбинного наконечника.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 26-27-37-36

№204-Black

Арт. 01019204



№205


Арт. 01012205

Клампы для моляров верхней и нижней челюсти. В отличие от клампа №200, его щечки воронкообразно изогнуты в апикальном направлении для лучшей фиксации, а жесткая дуга имеет прямоугольный профиль с сильно скругленными краями. Широкие щечки обеспечивают хороший обзор со всех сторон и не дают платку при натяжении приближаться к коронковой части зуба, в момент ее препарирования ротационными инструментами. На боковых крыльях имеются дополнительные овальные отверстия, облегчающие снятие края перфорации латексного платка при установке.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 17-16-26-27-37-36-46-47

№205-Black

Арт. 01019205

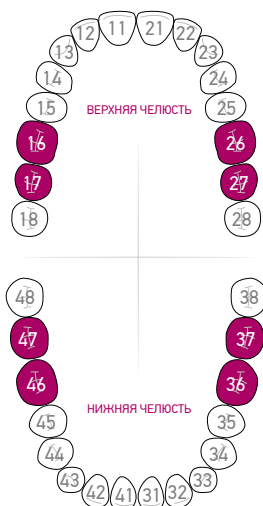

КЛАМПЫ ДЛЯ
ФРОНТАЛЬНОЙ
ГРУППЫ ЗУБОВ

 **DENTECH**



КЛАМПЫ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНОЙ ГРУППЫ ЗУБОВ



№6

Арт. 01012006

№6-Black

Арт. 01019006

Клампы «бабочка» с двумя дугами для резцов и клыков верхней челюсти. Для зубов с выраженной небной долей коронковой части, возможно с выраженным слепым отверстием, для крупных коронок. Щечки разного размера, имеются крылья для фиксации клампа в перфорации латексного платка при его одевании на опорные зубы. Кламп удобен при выполнении эндодонтического лечения, внутрикоронкового отбеливания и фиксации ортопедических конструкций.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 13-12-11-21-22-23



№9


Арт. 01012009

№9-Black

Арт. 01019009

Клампы «бабочка» с двумя дугами для резцов и клыков нижней челюсти. Щечки одного размера, имеются крылья для фиксации клампа в перфорации латексного платка при его одевании на опорные зубы. Кламп удобен при выполнении эндодонтического лечения, внутрикоронкового отбеливания и для фиксации ортопедических конструкций.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 33-32-31-41-42-43

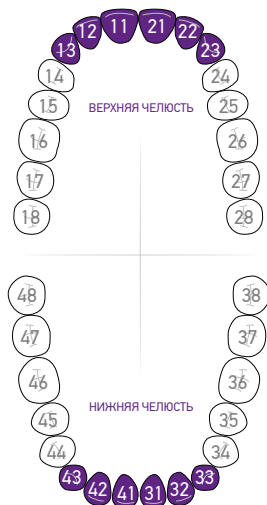

КЛАМПЫ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНОЙ ГРУППЫ ЗУБОВ



№210

Арт. 01012210



№210-Black

Арт. 01019210

Клампы «бабочка» с двумя дугами для резцов и клыков верхней челюсти, для зубов с выраженной небной долей коронковой части, возможно с выраженным слепым отверстием, для коронок среднего размера. Щечки разного размера, имеются крылья для фиксации клампы в перфорации латексного платка при его одевании на опорные зубы. Кламп удобен при выполнении эндодонтического лечения, внутрикоронкового отбеливания и фиксации ортопедических конструкций.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 13-12-11-21-22-23

аналог клампы Бринкер В6



№212

Арт. 01012212



№212-Black


Арт. 01019212

Клампы «бабочка» с двумя дугами для резцов, клыков и премоляров верхней и нижней челюсти. Щечки одного размера, чуть меньшего диаметра, чем у клампы №9, крылья для фиксации клампы в перфорации латексного платка отсутствуют. Рекомендуется при выполнении пломбирования полостей V-класса по Блэку на протяженных изолированных раббер-дамом участках зубного ряда в сочетании с любыми клампами, использованными как якорные. Также возможно его применение при выполнении эндодонтического лечения и внутрикоронкового отбеливания.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ:

15-14-13-12-11-21-22-23-24-25-35-34-32-31

41-42-43-44-45

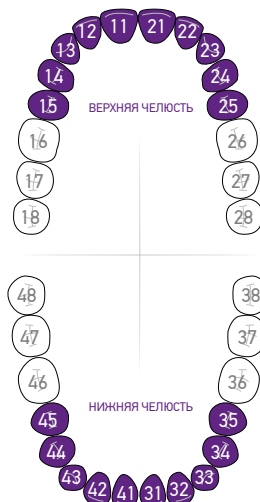

КЛАМПЫ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНОЙ ГРУППЫ ЗУБОВ

аналог клампа Бринкер В5



№212SA

Арт. 01018212

№212SA-Black

Арт. 01018214

Цервикальный кламп «бабочка» с двумя дугами для резцов, клыков и премоляров верхней и нижней челюсти. Сильный зажим мягких тканей. Крылья для фиксации клампа в перфорации латексного платка отсутствуют.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ:

15-14-13-12-11-21-22-23-24-25-35-34-33-32-31
41-42-43-44-45



№90N


Арт. 01012090

№90N-Black

Арт. 01019090

Клампы «бабочка» с двумя дугами для резцов и клыков нижней челюсти. Щечки одного размера, чуть меньшего диаметра, чем у клампа №9, крылья для фиксации клампа в перфорации латексного платка отсутствуют. Кламп очень близок по назначению с клампом №211. Удобен при выполнении эндодонтического лечения, внутрикоронкового отбеливания и фиксации ортопедических конструкций.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 33-32-31-41-42-43

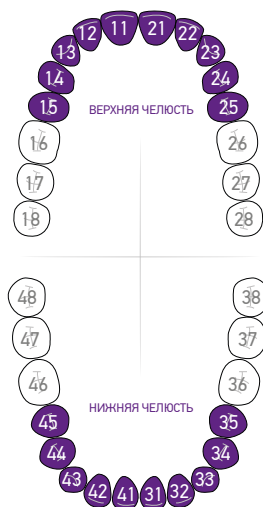

КЛАМПЫ
БРИНКЕРА

 **DENTECH**



КЛАМПЫ БРИНКЕРА

аналог клампа Бринкер В1



№W8A

Арт. 01012998

№W8A-Black

Арт. 01019998

Клампы для моляров верхней и нижней челюсти с очень разрушенной, практически отсутствующей, коронковой частью. Удлиненные боковые щеки и выступающие углы позволяют надежно фиксировать его на корне моляра на уровне десневой борозды и ниже. Отсутствие крыльев позволяет использовать клампы в дистальных участках зубного ряда у пациентов с небольшими размерами челюстей или очень выраженной косой линией нижней челюсти.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 17-16-26-27-37-36-46-47

аналог клампа Бринкер В2



№42

Арт. 01012042


№42-Black

Арт. 01019042

Клампы для моляров верхней челюсти. Асимметрия щеки клампа предполагает его использование с **левой стороны**. Применяется при очень разрушенной, практически отсутствующей коронковой части.

Крылья отсутствуют.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 26-27

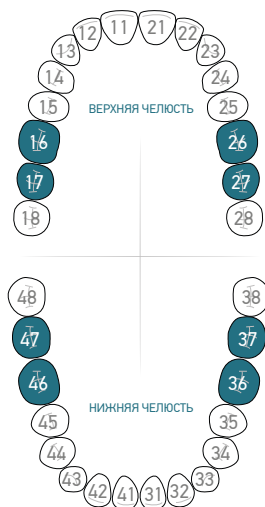

| КЛАМПЫ БРИНКЕРА

аналог клампа Бринкер В3



№43

Арт. 01012043

№43-Black

Арт. 01019043

Клампы для моляров верхней челюсти. Асимметрия щечек клампы предполагает его использование с **правой стороны**. Применяется при очень разрушенной, практически отсутствующей коронковой части. Крылья отсутствуют.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 16-17

аналог клампа Бринкер В4



№44

Арт. 01012044

№44-Black


Арт. 01019044

Универсальный микро-кламп для всех групп зубов.

САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ КЛАМП БРИНКЕР.


Применяется при пломбировании пришеечного кариеса (V-класс по Блэку), создании прямых композитных реставраций, а также при адгезивной фиксации ортопедических конструкций.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 15-14-13-12-11-21-22-23
24-25-35-34-33-32-31-41-42-43-44-45

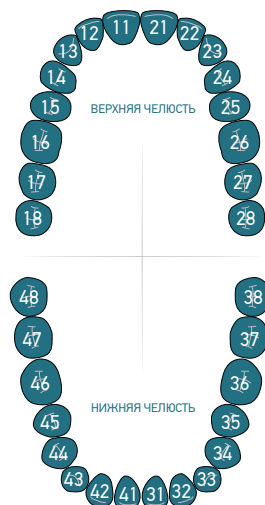

| КЛАМПЫ БРИНКЕРА

аналог клампа Бринкер В5

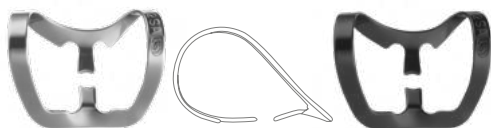

№212SA

Арт. 01018212

№212SA-Black

Арт. 01018214

Цервикальный кламп «бабочка» с двумя дугами для резцов, клыков и премоляров верхней и нижней челюсти. Сильный зажим мягких тканей. Крылья для фиксации клампа в перфорации латексного платка отсутствуют.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 15-14-13-12-11-21-22-23 24-25-35-34-33-32-31-41-42-43-44-45

аналог клампа Бринкер В6



№212


Арт. 01012212

№212-Black

Арт. 01019212

Клам «бабочка» с двумя дугами для резцов, клыков и премоляров верхней и нижней челюсти. Щечки одного размера, чуть меньшего диаметра, чем у клампа №9, крылья для фиксации клампа в перфорации латексного платка отсутствуют. Рекомендуется при выполнении пломбирования полостей V-класса по Блэну на протяженных изолированных раббердамом участках зубного ряда в сочетании с любыми клампами, использованными как якорные. Также возможно его применение при выполнении эндодонтического лечения и внутрикоронкового отбеливания.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 15-14-13-12-11-21-22-23 24-25-35-34-33-32-31-41-42-43-44-45

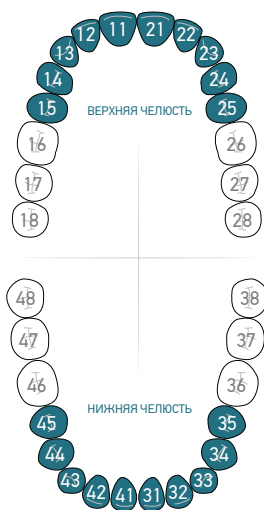

КЛАМПЫ ДЛЯ МОЛОЧНЫХ
ЗУБОВ И ПЕРВЫХ ДЕТСКИХ
МОЛЯРОВ

 **DENTECH**



КЛАМПЫ ДЛЯ МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ И ПЕРВЫХ ДЕТСКИХ МОЛЯРОВ



№54-Matt

Арт. 01015001

Клампы для 54 зуба, верхний, правый

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 54

№54-Black

Арт. 01020001



№55-Matt

Арт. 01015002

Клампы для 55 зуба, верхний, правый

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 55

№55-Black

Арт. 01020002



№64-Matt


Арт. 01015003

Клампы для 64 зуба, верхний, левый

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 64

№64-Black

Арт. 01020003

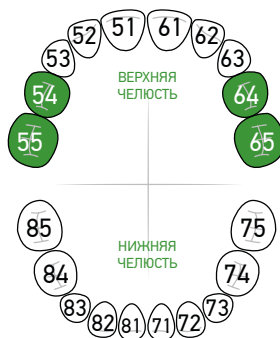

№65-Matt

Арт. 01015004

Клампы для 65 зуба, верхний, левый

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 65

№65-Black

Арт. 01020004

КЛАМПЫ ДЛЯ МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ И ПЕРВЫХ ДЕТСКИХ МОЛЯРОВ



№74-Matt

Арт. 01015005

Клампы для 74 зуба, нижний, левый

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 74



№74-Black

Арт. 01020005



№75-Matt

Арт. 01015006

Клампы для 75 зуба, нижний, левый

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 75



№75-Black

Арт. 01020006



№84-Matt

Арт. 01015007


Клампы для 84 зуба, нижний, правый

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 84



№84-Black

Арт. 01020007

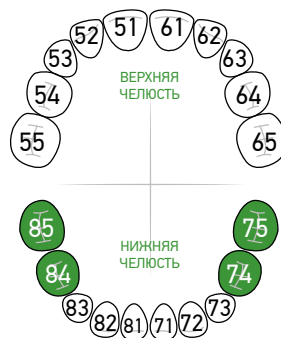

№85-Matt

Арт. 01015008

Клампы для 85 зуба, нижний, правый

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 85



№85-Black

Арт. 01020008

КЛАМПЫ ДЛЯ МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ И ПЕРВЫХ ДЕТСКИХ МОЛЯРОВ



№ P-1

Арт. 50580000

Клампы для 26 зуба, для детских первых моляров

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 26

№ P-1-Black

Арт. 50550020



№ P-2

Арт. 50580001

Клампы для 16 зуба, для детских первых моляров

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 16

№ P-2-Black

Арт. 50550021



КЛАМПЫ «ТИГРОВЫЕ»
(С РЕТЕНЦИОННЫМИ ЗУБЦАМИ)

 **DENTECH**



I КЛАМПЫ ТИГРОВЫЕ (С РЕТЕНЦИОННЫМИ ЗУБЦАМИ)



N°1T

Арт. 01012501

Клампы для клыков и премоляров верхней и нижней челюсти, для зубов с сильно разрушенной или отсутствующей коронковой частью (если оставшаяся часть корня при незначительной ретракции десны позволяет получить четырехточечную фиксацию клампа углами). Латеральные крылья небольшого размера. Щечки клампа имеют воронкообразный изгиб в апикальном направлении. По всей длине щечек клампа имеются ретенционные зубцы для его лучшей фиксации на зубах с атипичной формой коронковой части или при ее сильном разрушении. Рекомендуется при создании протяженных двусторонних участков изоляции зубных рядов, при лечении множественного кариеса, возможно в сочетании с эндодонтией нескольких зубов, при фиксации ортодонтических ретейнеров.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ:

15-14-13-23-24-25-35-34-33-43-44-45



N°2T

Арт. 01012503

Клампы для клыков и премоляров верхней и нижней челюсти, для зубов с незначительными разрушениями коронковой части, сохраненной ферулой и выраженным экватором. Латеральные крылья небольшого размера. Щечки клампа плоские, малого радиуса. По всей длине щечек клампа имеются ретенционные зубцы для его лучшей фиксации на зубах с атипичной формой коронковой части или при ее сильном разрушении. Рекомендуется при создании протяженных двусторонних участков изоляции зубных рядов, при лечении множественного кариеса, возможно в сочетании с эндодонтией нескольких зубов, при фиксации ортодонтических ретейнеров.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ:

15-14-13-23-24-25-35-34-33-43-44-45

N°1T-Black

Арт. 01019501



N°1AT

Арт. 01012502


Клампы для клыков и премоляров верхней и нижней челюсти, для зубов с сильно разрушенной или отсутствующей коронковой частью (если фиксация клампа N°1 на оставшейся части корня невозможна). Кламп имеет выраженные углы, выступающие значительно ниже плоскости щечек, что позволяет при значительной ретракции десны получить четырехточечную фиксацию клампа углами. Латеральные крылья среднего размера. Щечки клампа имеют выраженный воронкообразный изгиб в апикальном направлении.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ:

15-14-13-23-24-25-35-34-33-43-44-45

N°1AT-Black

Арт. 01019502

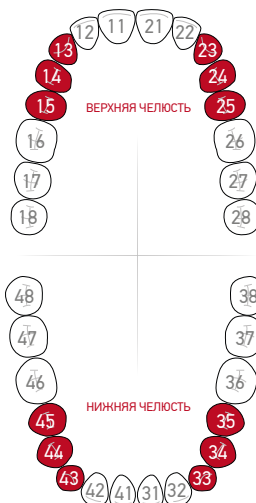

I КЛАМПЫ ТИГРОВЫЕ (С РЕТЕНЦИОННЫМИ ЗУБЦАМИ)



№2AT

Арт. 01012504

№2AT-Black

Арт. 01019504

Клампы для клыков и премоляров верхней и нижней челюсти, имеющих значительное разрушение коронковой части или с полностью разрушенной медиальной стенкой. Имеет щёчки небольшого размера как клампы №3. По всей длине щечек клампы имеют ретенционные зубцы для его лучшей фиксации на зубах с атипичной формой коронковой части или при ее сильном разрушении. Часто применяется для работы с кариозными поражениями твёрдых тканей зуба любой локализации и на коронках зубов с невыраженным экватором.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 15-14-13-23-24-25-35-34-33-43-44-45



№14T


Арт. 01012506

№14T-Black

Арт. 01019506

Клампы для моляров верхней и нижней челюсти, имеющих значительное разрушение коронковой части или с полностью разрушенной медиальной стенкой. Имеет щёчки небольшого размера как у клампы №3, но в отличие от него, щёчки изогнуты по плоскости в виде воронки. По всей длине щечек клампы имеются ретенционные зубцы для его лучшей фиксации на зубах с атипичной формой коронковой части или при ее сильном разрушении. Часто применяется для работы с кариозными поражениями твёрдых тканей зуба любой локализации и на коронках зубов с невыраженным экватором.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 17-16-26-27-37-36-46-47

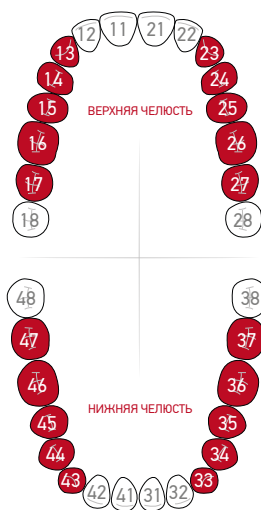


I КЛАМПЫ ТИГРОВЫЕ (С РЕТЕНЦИОННЫМИ ЗУБЦАМИ)



№56T

Арт. 01012507

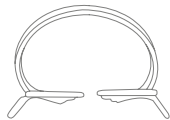

№56T-Black

Арт. 01019505

Клампы для моляров верхней и нижней челюсти, с диаметром и щечками среднего размера. По всей длине щечек клампы имеют ретенционные зубцы для его лучшей фиксации на зубах с атипичной формой коронковой части или при ее сильном разрушении. Выраженная вогнутость щечек и горизонтально расположенные малые крылья не мешают вспомогательным инструментам и аксессуарам при создании реставраций II-класса по Блэку.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 17-16-26-27-37-36-46-47



№9T

Арт. 01012505




№9T-Black

Арт. 01019505

Клампы с двумя дугами для резцов и клыков нижней челюсти. Щечки одного размера, имеются крылья для удержания клампы в перфорации латексного платка при его одевании на опорные зубы. По всей длине щечек клампы имеют ретенционные зубцы для его лучшей фиксации на зубах с атипичной формой коронковой части или при ее сильном разрушении. Клампы удобны при выполнении эндодонтического лечения, внутрикоронкового отбеливания и фиксации ортопедических конструкций.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 33-32-31-41-42-43

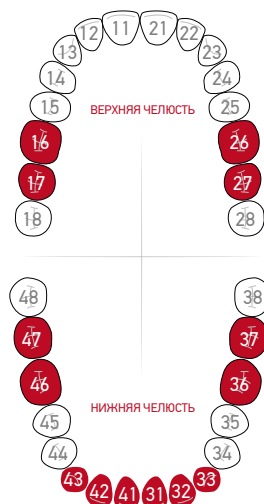

КЛАМПЫ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ

 **DENTECH**



I КЛАМПЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ



№ G-1

Арт. 50580002

Клампы для удержания языка пациента латерально от обрабатываемого ротационным инструментом зуба, предназначен для 36, 37 зубов (левый). Имеет асимметричные щеки, позволяющие вестибулярно закрепить ватный тампон для абсорбции части слюны из полости рта. Особенно рекомендуется при создании пре-эндодонтической композитной реставрации сильно разрушенного зуба.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 36-37




№ G-2


Арт. 50580003

Клампы для удержания языка пациента латерально от обрабатываемого ротационным инструментом зуба, предназначен для 46, 47 зубов (правый). Имеет асимметричные щеки, позволяющие вестибулярно закрепить ватный тампон для абсорбции части слюны из полости рта. Особенно рекомендуется при создании пре-эндодонтической композитной реставрации сильно разрушенного зуба.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 46-47

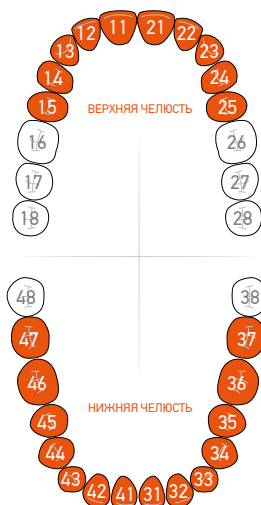

| КЛАМПЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

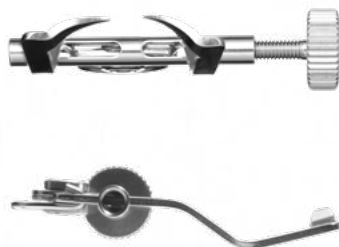


№ 215

Арт. 01071000

Наиболее универсальный инструмент для создания идеально плотных контактов между зубами любой групповой принадлежности. Благодаря возможности перестановки стягивающего винта с одной стороны резьбовой втулки на другую, кламп может быть установлен в любом секстанте зубных рядов в двух положениях (прижимая десневые сосочки и открывая доступ в межзубное пространство или наоборот, глубже отодвигая межзубную десневую вогнутость под восстанавливаемым контактным пунктом). Совместим со всеми системами матриц, межзубных клиньев и прижимных колец. Возможно, что начав работать с этим клампом, Вам захочется переделать все контактные пункты, сделанные ранее.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ:

17-16-15-14-13-12-11-21-22-23-24-25-26-27-37-36-35-34-33-43-44-45-46-47

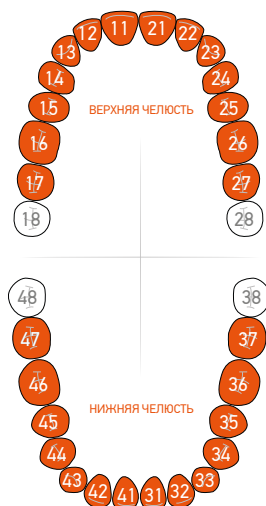

КЛАМПЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ




№ 216

Арт. 01072000

Специальный инструмент для проведения кратковременного разведения пары контактирующих зубов во фронтальном участке зубного ряда верхней и нижней челюсти на доли миллиметра, которые обеспечивает эластичность периодонтальной связи. Это может потребоваться для того, чтобы не разорвать полотно латексного платка и десневые сосочки флоссом, а также при фиксации контурных матриц для создания плотных апроксимальных контактов между медиальными поверхностями соседних зубов при реставрации кариеса III, IV класса по Блэку.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ:

14-13-12-11-21-22-23-24-34-33-32-31-41-42-43-44

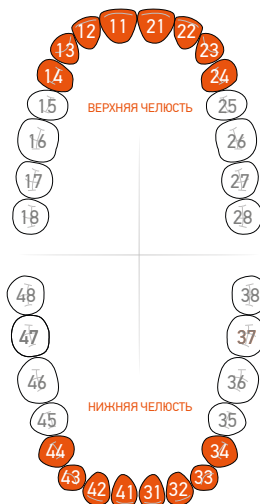


НАБОРЫ, ПОДСТАВКИ
И ОТДЕЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

 **DENTECH**



НАБОР TECHNIC SET

Арт. 50020000

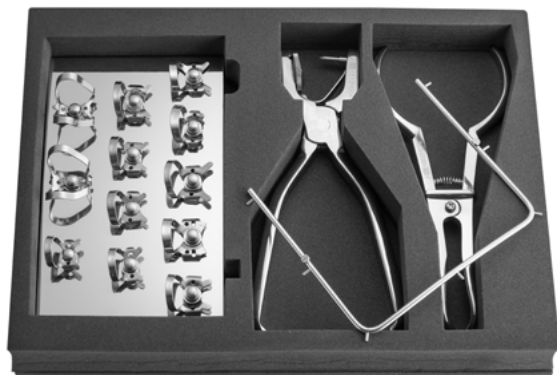

Комплектация:

1. Набор из 12 клампов на подставке (№: 1, 2, 4, 7, 8, 8A, 9, 12A, 13A, 14, 14A, 210)
2. Щипцы для установки клампов
3. Перфоратор для прокалывания отверстий
4. Рамка для латексного листа

НАБОР ИЗ 12 КЛАМПОВ НА ПОДСТАВКЕ

Арт. 50020001



Размер:

150x90мм.

Комплектация:

1. Подставка для хранения и стерилизации клампов (металлическая)
2. Клампы 12 шт. в ассортименте: №: 1, 2, 4, 7, 8, 8A, 9, 12A, 13A, 14, 14A, 210

НАБОР ИЗ 12 ЧЕРНЫХ КЛАМПОВ НА ПОДСТАВКЕ «BLACK»

Арт. 50020010



Размер:

150x90мм.

Комплектация:

1. Подставка для хранения и стерилизации клампов (металлическая)
2. Клампы с черным покрытием, 12 шт. в ассортименте: № 1-Black, 2-Black, 4-Black, 7-Black, 8-Black, 8A-Black, 9-Black, 12A-Black, 13A-Black, 14-Black, 14A-Black, 210-Black

| НАБОР «BRINKER PLUS SET»

Арт. 50021001



Размер:

90x90мм.

Комплектация:

1. Подставка для хранения и стерилизации клампов коффер-дам (металлическая)
2. Клампы «Бринкера»: 7 штук + 1 самый популярный компактный кламп для моляров: № W8A (Brinker B1), № 42 (Brinker B2), № 43 (Brinker B3), № 44 (Brinker B4) - 2 штуки, № 212SA (Brinker B5), № 212 (Brinker B6) и № U67 (компактный кламп для моляров)

| НАБОР ИЗ 8 КЛАМПОВ ДЛЯ МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ НА ПОДСТАВКЕ

Арт. 01041060



Размер:

90x90мм.

Комплектация:

1. Подставка для хранения и стерилизации клампов (металлическая)
2. Клампы 8шт: №: 54, 55, 64, 65, 74, 75, 84, 85

| ПОДСТАВКА ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЯ 12 КЛАМПОВ


Арт. 01041010

Размер: 150x90мм.



ЩИПЦЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ КЛАМПОВ

Арт. 01031040

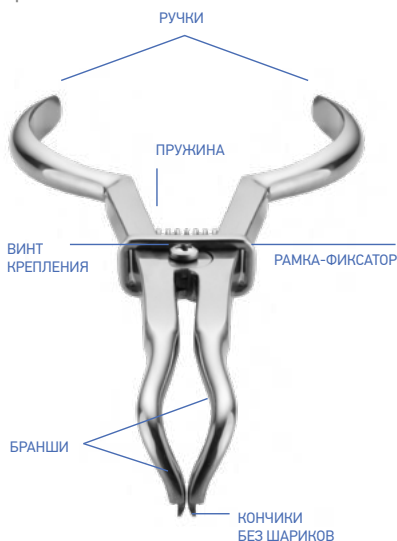

Тип: DENTECH

Размеры: 165x70мм.



Особенности: Кончики специальной формы (без шариков) для максимально легкой и удобной постановки/снятия клампов.

Стальные щипцы для установки клампов удобно фиксируются в ладони и надежно удерживают в растянутом положении любой кламп. Для снижения физической нагрузки в процессе установки клампов на изолируемые зубы, на щипцах имеется рамка-фиксатор, свободно передвигающаяся по ручкам щипцов между их изгибом и центральным фиксирующим винтом.

Для фиксации клампа на выбранном зубе, его устанавливают на щипцы и немного разводят их бранши, фиксируя это положение рамкой-фиксатором.

ПЕРФОРАТОР ДЛЯ ПРОКАЛЫВАНИЯ ОТВЕРСТИЙ

Арт. 01021011

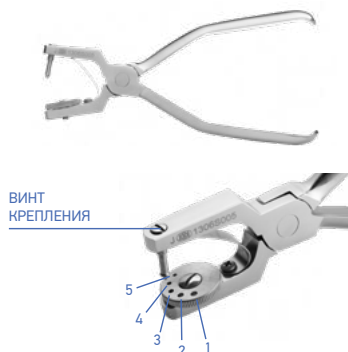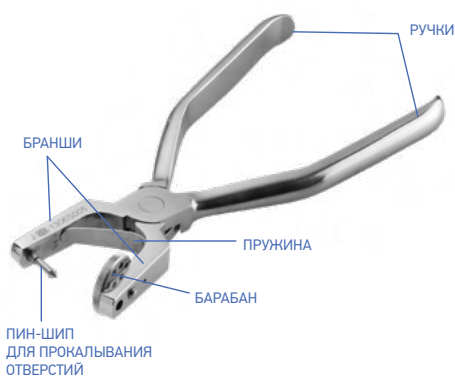

Тип: Ainsworth

Размеры: 155x75мм.

Кол-во отверстий: 5

Барабан, закрепленный на одной из браншей пробойника Ainsworth может вращаться вокруг своей оси. На барабане есть 5 сквозных отверстий разного диаметра для формирования в латексном платке перфораций под различные группы зубов:

Отверстия №1 и №2 предназначены для моляров верхней и нижней челюсти.


Отверстие №3 - для клыков и премоляров верхней и нижней челюсти.

Отверстие №4 - для резцов верхней челюсти.

Отверстие №5 - для резцов нижней челюсти.

РАМКА ДЛЯ ЛАТЕКСНОГО ЛИСТА

Арт. 01022010

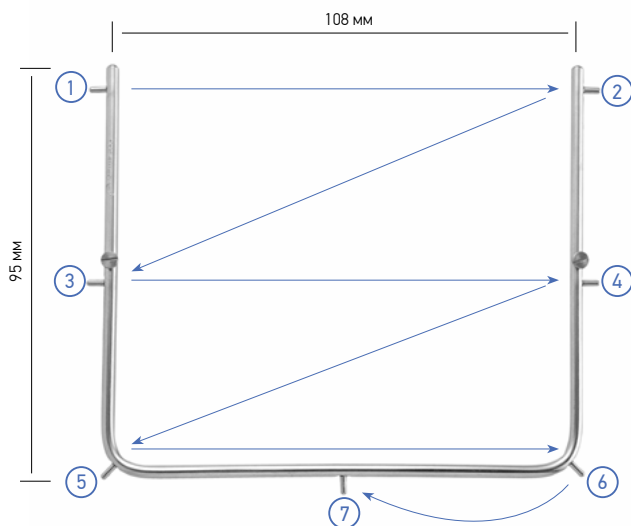

ВИНТ ДЛЯ ФИКСАЦИИ
КОНЦОВ ЛИГАТУР (ФЛОССА)



РЕТЕЙНЕР

Тип: Young

Размер: 108x95мм.

Особенности: винты для фиксации флосса.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ФИКСАЦИИ
ЛАТЕКСНОГО ЛИСТА НА РЕТЕЙНЕРАХ РАМКИ

DENTECH

MADE IN JAPAN | SINCE 1907



TOP GLOVE

TOP QUALITY, TOP EFFICIENCY



Компания "АЛДЕНТ" (Все права защищены)

Данный каталог предназначен для практикующих стоматологов, студентов медицинских образовательных учреждений, компаний ведущих торговую деятельность в сфере продаж стоматологического инструментария и расходных материалов.

Дизайн каталога, равно как и все представленные в нем иллюстрации, графические элементы, текстовые маркеры и идентификаторы являются интеллектуальной собственностью компании. Для частичного или полного копирования, а также заимствования любого из вышеперечисленных элементов в личных, коммерческих или образовательных целях Вам необходимо отправить запрос руководству компании и получить на это письменное согласие.

Каталог носит информационный характер. Компания не несет ответственности за возможные ошибки и опечатки в тексте, а также расхождения относительно реального цвета и формы продукции, изображенной на иллюстрациях. Компания оставляет за собой право на внесение изменений.

2023-09 Версия 2/20.09.2023

DENTECH CORPORATION
53-5 Shimizu-cho, Itabashi-ku,
Токио, 174-0053, Япония
tel: +81-3-3962-5621
fax: +81-3-3962-5624
www.dentech.co.jp

DURAMEDICAL SDN. BHD.
Lot 4962, Jalan Teratai, Batu 6,
Off Jalan Meru, 41050 Klang,
Selangor Darul Ehsan, Малайзия
tel: +603-3362-3098
www.topglove.com